

FlexBeam®

Punase valguse seade

Kasutusjuhend

V2.15

November 2022

Sisukord

Kasutusjuhend

Vastunäidustused

Hoiatused

Ettevaatusabinõud

Sümbolid ja definitsioonid

Funktsioonide ülevaade

FlexBeam®-i kasutamine

Üldine seadmehooldus

Teenindus ja kaheaastane piiratud garantii

Toote spetsifikatsioonid

Keskkonnakaitse

Tehniline kirjeldus

Tootja kontaktandmed

Lugege käesolevat juhendit, et mõista, kuidas seadet õigesti ja ohutult kasutada.

Ohutuid ja kliiniliselt tõestatud valguse lainepikkuseid kasutades jäljendab FlexBeam® päikesetõusu ja -loojangu loomulikke jõudu, andes teie kehale võimaluse ennast taastada. Meie teaduslikult väljatöötatud programmid võimaldavad valida punase valguse, infrapunavalguse või nende mõlema kombinatsiooni vahel, mis võib pakkuda järgnevat:



**Vereringe
taaselus-
tamine**



**Valu
leven-
damine**



**Soorituse
parandamine**



**Naha
hooldamine**



**Põletiku
vähendamine**

Tarvikud

- > Laadimisseade
- > Duoribad
- > Miniriba
- > Kehariba
- > Juhend
- > Prillid

Kasutusjuhend

FlexBeam® on taastusravi seade, mis on loodud kiirgama punast valgust ja infrapuna-/lähi-infrapunavalgust fototeraapiaks, et kiirendada naha/limaskesta kudede paranemist ja/või leevendada luu- ja lihaskonna sümptomeid (nt valu, spasm, jäikus) rakkude metabolismi muutmise ja/või verevoolu parandamise kaudu. Seade on mõeldud koduseks kasutamiseks!

FlexBeam® ei ole mõeldud kasutamiseks imikute või väikelaste poolt. Üle 12-aastased lapsed tohivad seda kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. Täiendava teabe jaoks FlexBeam®-i õige kasutamise kohta pöörduge Baltikumi ametliku Recharge Health esindaja poole Luxsanat OÜ

info@flexbeam.eu

või pidage nõu tervishoiuteenuse osutajaga.

P1 unase/infrapunavalgusega fototeraapia seade kirjeldatuna GMDN - koodiga 65723.



**Recharge Health on ISO 13485:2016
tunnustusega ettevõtte.**

Vastunäidustused

- **Ärge kasutage pahaloomuliste ja muude kasvajate korral.**
- **Ärge kasutage lahtiste veritsevate haavade korral.**



Hoiatused

- **FlexBeam®-i ohutu kasutamine on kasutaja esmane vastutus. Kui FlexBeam® näib valesti töötavat, lõpetage kohe kasutamine ja võtke ühendust R. P alun järgige selles juhendis esitatud juhiseid ja kasutage FlexBeam®-i ainult ettenähtud otstarbel.**
- **Põletused: FlexBeam® ei põhjusta nahapõletust. See on tingitud sellest, et FlexBeam®-i terapeutiline toime on tingitud valgusest, mitte soojusest. Teatud naha äärmise tundlikkuse juhtudel võib esineda punetus või villid. Sellistel juhtudel peatage kohe FlexBeam®-i kasutamine ja edasiste nõuannete saamiseks pidage nõu oma arstiga. Sellist tüüpi reaktsiooni ilmnemisel võtke ühendust ka Recharge Health'i klienditoega.**
- **FlexBeam® ei ole mõeldud kasutamiseks silmade, nõi või pea piirkonnas. Vältige otse valgusdiodidesse vaatamist**

ja selle kasutamist silmadele lähemal kui 30 cm. Kiirgab võimast nähtamatut infrapunavalgust.

- Kasutage komplekti kuuluvaid kaitseprille juhtudel, kui põgenenud valgus otse silma paistab.
- Ärge kasutage seda rinnakoe, kilpnäärme ja munandite peal. FlexBeam® ei ole ette nähtud endokriinsete haiguste raviks.
- FlexBeam®-i rasedus- või sünnitusaegse kasutamise ohutust ei ole kindlaks tehtud.
- Hügieeni tagamiseks ärge asetage otse lahtisele haavale.
- Hoiduge FlexBeam®-i veenilaiendite, flebiidi ja tromboflebiidiga piirkondadel pingul kandmisest. Seda saab kasutada selle piirkonna kohal, kui see ei puutu nahaga kokku.
- Ärge kasutage FlexBeam®-i märjal nahal. Ärge kastke FlexBeam®-i vette ega kasutage kohtades, kus on võimalik kokkupuude veega, näiteks vannis.
- Vältige vedelike FlexBeam®-ile lekkimist. Lõpetage kasutamine, kui see on vedelikku sukeldatud.
- Äärmuslik kuumus ja külm võivad mõjutada FlexBeam®-i toimimist.
- Nahaärritus, verevalumid, kontaktpõletused, pearinglus, iiveldus ja peavalud on haruldased, kuid võimalikud kõrvaltoimed.
- Sobib võrgu toitepingele 90-265V.

- FlexBeam® sisaldab räni ja plastikut, mis puutuvad kasutamise ajal nahaga kokku. Ärge kasutage seda, kui teil esineb nende materjalide suhtes allergia või reaktsioon.
- Laadimiskaabel kujutab endast kähgistamisohtu. Hoida nõuetekohaselt, kui seda ei kasutata.
- Ärge kasutage oma laadijat ega muid lisaseadmeid, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, ärge ühendage seadet ühegi muu seadmega, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud ning ärge seadet mingil viisil muutke.
- Ärge FlexBeam®-i mingil viisil muutke.
- Ärge jätke FlexBeam®-i ühtegi osa keemiliste lahustite või tugevatoimeliste puhastusvedelike kätte. Järgige selles juhendis toodud puhastusjuhiseid.
- Ärge katke ega ummistage seadme õhuavasid, kuna see võib põhjustada FlexBeam®-i ülekuumenemise ja tuua kaasa automaatse väljalülitumise.
- FlexBeam® ei ole kasutaja poolt hooldatav. Ärge kunagi proovige selle seadme korpust avada. Korpuse avamine tühistab tootjagarantii.
- Kasutage ainult komplekti kuuluvat Recharge Health'i toiteadapterit mudelinumbriga YL361-1502400V.



Ettevaatusabinõud

- FlexBeam®-i tohib kasutada ainult tootja heakskiidetud tarvikutega.
- Kui seade ei toimi korralikult või tundub olevat vigane, võtke ühendust ettevõttega Baltikumi ametliku Recharge Health esindaja poole Avatar Treasury OÜ info@flexbeam.ee
- Enne FlexBeam®-i kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui teil on palavik, äge põletik, vereringehäire, valgustundlikkus, tuimestatud või desensibiliseeritud kehapiirkonnad.
- Olge ettevaatlik ravimeid tarvitades. Kahtluse korral pidage nõu oma tervishoiutöötajaga. Laske 3-5 päeva mööduda pärast valgustundlike ravimite/toidulisandite või suurte kortikosteroidide annuste võtmist. Kui teil on kahtluseid, pidage nõu arstiga.
- Valgustundlikkuse esinemisel vähendage kokkupuuteaega.
- Olge ettevaatlik FlexBeam®-i kandmisel paistes, nakatunud või põletikulistele kohtadele, kuna see võib tuua kaasa sümptomite halvenemise. Täiendavate nõuannete saamiseks pidage nõu oma arstiga.
- Olge ettevaatlik FlexBeam®-i kasutamisel, kui teil on või võib olla südamehaigus.
- Olge ettevaatlik FlexBeam®-i kasutamisel, kui teil on

epilepsia.

- **Olge ettevaatlik, kui kasutate seadet tumedal pigmenteerunud nahal: vähendage kokkupuuteaega ühes kohas kuni 10 minutini.**

- **Olge ettevaatlik seadme tätoveeringute kohal kasutamisel. Vähendage kokkupuuteaega (kuni tunnete kuumust) või kasutage tätoveeritud piirkonnas programmi 3 asemel programmi 2. Võimalusel vältige FlexBeam®-i asetamist hiljuti tätoveeritud naha kohale või ulatusliku tumeda tindi sisaldusega tätoveeringutele.**

- **Olge ettevaatlik, kui kasutate FlexBeam®-i diagnoosimata nahahaiguste korral. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arstiga.**

- **Olge ettevaatlik, kui kasutate FlexBeam®-i proteeside või implantaatide kohal. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arstiga.**

- **Kui täheldate seadme ebataavalist käitumist, eriti kui selline käitumine on katkendlik ja seotud läheduses asuva raadio- või telestaatja, mobiiltelefoni või elektrokirurgiliste seadmete kasutamisega, võib see viidata elektromagnetilisele interferentsile. Sellise käitumise ilmnedes peaksite proovima häirivat seadet sellest seadmest kaugemale viia.**

- **Flexbeam on loodud teie ohutust silmas pidades ja lülitub automaatselt välja, kui temperatuur on ohutuspiirist**

tunduvalt madalam. Kui märkate iga tsükli lõppedes seda, et seadme temperatuur on tavapärasest kõrgem, siis palume teil FlexBeam®-i kasutamine lõpetada. Enne järgmist kasutuskorda laske sellel jahtuda 10-20 minutit.

- **Ärge laadige oma FlexBeam®-i üle.**

Sümbolid ja definitsioonid



See seade on siinlülis olevate juhenditega. Sümbol näitab, et seade on toetatud selle sümboliga kaetud seadme elektrilõigetega tootmise järgi.



ÄRGE kasutage FlexBeam'i enne käesoleva juhendi lugemist.



Hooldke FlexBeam'i kuiv, ÄRGE kasuta vette.



MITTE KÄSITLEDA KÄSITLUSKÄSI.



Hindamisel IEC 2A, Li-ionakku, 30,400mAh rating, Valmistatud Tais. IP20: kaetud suurema kui 12,5 mm tahke objekt, mis on sisse eest. Ei ole kaetud vedelike eest.



Lugege kasutusjuhendit enne kasutamist



Mitu korda erinevatel kasutajatel kasutatav

FlexBeam®

Recharge Healthi juhtiv valgus seade



SERVICEABLE



IP20



MD



MULTIPLE USE



RISK GROUP 1 - CAUTION

Rated Input: DC 15.0V 2.4A 36.0W

www.recharge.health

GTN XXXXXXXXXXXXXXXX
LOT XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



0010060201151001111
21002111712400211103
1000201121110432211
004320

 **recharge**
health

Baltikumi ametlik Recharge Health
esindaja Luxsanat OÜ
info@flexbeam.ee

Funktsioonide ülevaade



Definitsioonid

Laadimispesa

Sisse- väljalülitamine

Sisselülitamiseks hoidke 2

Programmi valimine

1: Nahk ja pind

2: Lihased ja koed

3: Süvakude ja liigesed

Peata/jätka

Saate peatatud olekus
programme muuta

Akutase

Madal: 3 põksu ja
vilkvu tuli Pooltäis: 2
põksu

Täis: 1 põks

Kasutamine: FlexBeam®-i asetamine kindlale kehapiirkonnale.

Tsükel: Piisav valgusstimulatsioon juba ühe 10-minutilise FlexBeam®-i seansiga.

Programm: Tsükli jooksul automatiseeritud valguse lainepikkuste, sageduste ja võimsuse võimsusmodulatsioonide edastamine. Iga programm tagab erineva valguse läbitungimise astme.

FlexBeam®-i kasutamine

Enne FlexBeam®-i esmakordset kasutamist veenduge, et see on täielikult laetud. Sisestage komplekti kuuluv toitejuhe oma FlexBeam®-i liidesmooduli toitepesa. Selle laadimiseks kulub umbes kaks tundi.

1 FlexBeam®-i positsioneerimine

Asetage FlexBeam® soovitud kohale, kinnitades see vajadusel komplekti kuuluvate ribadega. Kasutage FlexBeam®-i alati otse nahal, eemaldades kõik riided. Valgus ei tungi riietest läbi ja kuur on selliselt ebatõhus. Saate FlexBeam®-i keha külge kinnitada komplekti kuuluvate ribadega. Nende ribad kasutamise juhised leiate veebist ja lühijuhendist.



Oluline: Ärge kunagi vaadake LED-tuledesse ega kasutage FlexBeam®-i silmadest lähemal kui 30 cm.

Seade kiirgab võimast nähtamatut infrapunavalgust.

Programmi valimine

2 Lülitage FlexBeam® sisse ja valige programm:



1. Nahk ja pind

Peamiselt punane valgus.



2. Lihased ja kude

Kombineeritud punane/infrapuna valgus, et jõuda naha alla.



3. Süvakude ja liigesed

Võimas infrapunavalgus tungib sügavamale kehasse.

Iga programm on ajastatud 10-minutilise tsükliks. Lõpetamise järel esitab teie FlexBeam® heli ja teeb pausi, et võimaldada teise programmi valimist. Kui seda ei kasutata, lülitub see automaatselt VÄLJA.

3 Millal FlexBeam®-i kasutada

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage üks kord päevas või kuni neli korda päevas erinevatel kehapiirkondadel. FlexBeam® on loodud pakkuma iga programmi tsükli jaoks optimaalset valgusannust, et käivitada teie keha isetervenemise reaktsioon.

FlexBeam®-i ühele kehaosale: kasutage ainult ühte p (tavaliselt on see piisav optimaalse stimulatsiooniannuse saavutamiseks). Ärge üle kasutage.

Kui kasutate FlexBeam®-i mitmel kehaosal: kandke ühe päeva jooksul kaks kuni kolm või kuni neli 10-minutilist tsüklit erinevatele kehapiirkondadele. Valgusel on kehas kumulatiivne toime. Igapäevasel kasutamisel tehke aeg-ajalt pause. Ärge üle kasutage. Ärge kandke kaks korda samasse kohta.

Täiendavate juhiste saamiseks pöörduge oma isikliku juhendi või meie kasutajatoe veebisaidi või meie kasutajatoe meeskonna poole veebis aadressil:

Märgutuled

- Kui aku on väga tühi, vilgub kollane tuli ühe minuti, seejärel lülitub FlexBeam® automaatselt välja.
- Kui ilmneb tõrge, vilguvad järjestikku SEES/VÄLJA-nupu ümber olevad märgutuled. Lülitage seade välja, oodake mõni minut, seejärel lülitage see uuesti sisse. Kui probleem püsib, võtke ühendust Recharge Health'i või oma FlexBeam®-i edasimüüjaga.

Üldine seadmehooldus

Aku

- FlexBeam® on mõeldud pidevaks kasutamiseks. Seadet saab kasutada laadimise ajal. Laadimisaeg tühjast olekust täislaadimiseni on 2 tundi.
- FlexBeam®-i saab võtta kaasa lennukisse, käsipagasis või äraantavas pagasis.
- Ärge üritage laetavaid liitiumioonakusid vahetada. See võib kaasa tuua ohu tekkimise. Aku on vahetatav, kuid seda tohib vahetada ainult volitatud teeninduspersonal. Saadaval on akukomplekti vahetus. Tüüpiline liitiumioonaku kasutusiga = 600+ laadimistsükli = 9000 rakendust.

Kasutusaeg

- FlexBeam®-i kasutusiga on 5 aastat. Aku vahetamine võib olla vajalik 2,5 aasta pärast; vastavalt on FlexBeam®-i säilivusaeg ligikaudu 2 aastat. Aku vahetamiseks võtke ühendust

Hoiustamine ja puhastamine

- FlexBeam®-i tuleb hoida komplekti kuuluvas karbis, kui seda ei kasutata, et vältida tolmu ja prahi seadmesse sattumist.

- Puhastage/desinfitseerige oma FlexBeam®-i, kui toide on välja lülitatud. FlexBeam®-i kontaktpinda on soovitatav puhastada/desinfitseerida 70% isopropüülalkoholi sisaldavate salvrätikutega pärast igat hooldust või enne selle kasutamist teisel kasutajal/patsiendil. Ülejäänud osa seadmest saab määrdumise korral puhastada niiske lapiga.
- Teiste puhastus-/desinfitseerimislahuste (nt söövitava toimega aine, etüülalkohol ja/või ammooniumkloriid) kasutamine võib plastkorpust kahjustada või pragundada. Ärge kunagi pihustage puhastusvahendeid otse seadmele.
- Heakskiitmata puhastusvahendite kasutamine toob kaasa tootjagarantii tühisuse.

Teenindus ja kaheaastane piiratud garantii

Kaheaastane (2-aastane) garantii katab kõik tootmis- ja materjalidefektid, mis garantiiaja jooksul tavapärase kasutamise korral ilmnevad.

Recharge Health (ettevõtte) parandab või asendab tasuta toote või toote osad, mis tavapärasel kasutamise ja hoolduse korral on ebaõige materjali või töötlemise tõttu defektsed. Käesolev garantii ei hõlma tarvikuid ega kulutarvikuid. Välistatud on järgmised esemed: kandekotid, reisikotid, keharihmad, kaitseprillid jne.

Selle teeninduse kasutamiseks peate esmalt võtma meiega ühendust e-posti teel aadressil support@recharge.health või

meie veebisaidi kasutajatoe portaali kaudu, et tuvastada probleem ja leida sobivaim lahendus. Pange tähele, et garantiiteeninduse taotluse menetlemiseks antakse teile meie teenindusmeeskonna poolt juhised teostada mitu tõrkelahenduse ülesannet.

Me parandame või asendame toote tasuta. Kui tõrkelahenduse ülesanded on teostatud ja meie teenindusmeeskond on tuvastanud, et tõrge on garantiiga kaetud, korraldame selle, et meie kuller tuleks tootele järele või alternatiivselt otsustame teile saata asendusüksuse.

Esimese 30 päeva jooksul pärast ostukuupäeva katab ettevõtte kõik saatmiskulud. Pärast 30 päeva möödumist ostukuupäevast vastutab klient kõikide saatmiskulude eest. Kõigi

Recharge Health'i toodete garantiaeg algab ostukuupäevast. Asendustootele või tooteosale kehtib originaaltoote ülejäänud garantii. Piiratud garantiid ei saa üle anda.

Garantii kehtib ainult meie kaupluses ostjana või saadetise saajana registreeritud isikute jaoks. Ettevõtte jätab endale õiguse nõuda ostutõendit enne garantiiteenuste pakkumist.

Meie tooted ei ole kasutaja poolt hooldatavad. Ärge avage neid ega ühelgi viisil muutke valmistooteid, kuna see toob

kaasa tootjagarantii tühisuse. Kõik hoiatused, ettevaatusabinõud ja kasutusjuhendis sisalduvad juhised on järgimiseks kohustuslikud, et tagada täielik garantii kehtivus.

Piiratud garantii ei kata toote kahjustusi või tõrkeid, mis on põhjustatud hooletusest (nagu kriimustused, praod, kukkumised, vette kastmine jne), ebaõigest hooldusest või toote muutmisest; looduslikel põhjustel tekkinud kahjustustest nagu äikese, üleujutuse, vihma või muude loodusõnnetuste põhjustatud kahjustused; toote vargus või kadumine.

Kõik kaudsed garantiid, sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiid turustatavuse ja konkreetseks otstarbeks sobivuse kohta on piiratud kehtiva garantiiperioodi kestusega.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba kaudse garantii kestuse piiramist, seega ei pruugi ülaltoodud piirang teie puhul kehtida.

Tagastamine

Kui olete ostnud oma FlexBeam®-i kolmandast isikust edasimüüjalt (kõikjal, välja arvatud meie ametlik veebisait: www.recharge.health), teostab kõik toodete tagastamised, parandamised või uuendamised eranditult edasimüüja. Baltikumi ametlik Recharge Health esindaja Luxsanat OÜ Info@flexbeam.eu

ETTEVÕTE EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL TOODETE DEFEEKTIDE EEST, MIS TULENEVAD REGULAARSEST KULUMISEST VÕI TAHTLIKUST

KAHJUSTAMISEST, HOOLETUSEST, EBANORMAALSETEST TÖÖTINGIMUSTEST, TOOTE KIRJALIKE JUHENDMATERJALIDE (KIIRJUHEND, TEIE ISIKLIK JUHEND JA KASUTUSJUHEND) MITTEJÄRGIMISEST, VÄÄRKASUTAMISEST VÕI TOODETE MUUTMISEST VÕI PARANDAMISEST ETTEVÕTTE HEAKSKIIDUTA VÕI TEIE VÕI KOLMANDA ISIKU MUUST TEOST VÕI TEGEVUSETUSEST.

GARANTII MISTAHES RIKKUMISE KORRAL ON MEIE VASTUTUS PIIRATUD PARANDAMISE VÕI, KUI SEE EI OLE PRAKTILINE, VASTAVA(TE) TOOTE(TOODETE) ASENDAMIESGA. ME EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL TOOTE(TOODETE) EEST MAKSTUD SUMMADE EEST. ETTEVÕTE EI VASTUTA TEIE (KLIENDI) EGA KOLMANDA ISIKU EEST KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE VÕI TINGITUD KAHJUDE EEST, MIS ON TINGITUD SELGESÕNALISE VÕI VIIDATUD GARANTII VÕI TINGIMUSE RIKKUMISEST VÕI ETTE NÄHTUD MÕNE ÕIGUSTEOORIAGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT HÕLMAB SEE KASUTUSE, KÄIBE, OODATAVA KASUMI, ÄRIVÕIMALUSE, HEATAHTE JA MAINE KAOTAMIST.

ETTEVÕTTE VASTUTUS EI ÜLETA MITTE ÜHELGI JUHUL TEIE POOLT TEGELIKULT DEFEKTSE TOOTE EEST TASUTUD SUMMAT. MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBA ERILISE, KAUDSE, JUHUSLIKU VÕI TINGITUD KAHJU PIIRANGUT, SEE TÄHENDAB, ET EELMAINITUD PIIRANG VÕI VÄLISTUS EI PRUUGI TEIE SUHTES KEHTIDA. EELMAINITUD PIIRANGUD EI KEHTI SURMA VÕI ISIKUKAHJU, SEADUSJÄRGSE TAHTLIKU JA RASKEST LOHAKUSEST TINGITUD TEGUDE JA/VÕI TEGEVUSETUSE KORRAL
A.eg-ajalt Recharge Health uuendab seda garantiid. Garantii uusima versiooniga tutvumiseks külastage veebisaiti.

Toote spetsifikatsioonid

Konfiguratsioon	3 valgustijalga, 2 infrapuna- ja üks punase valguse LED igal jalal
Lainepikkus	6 x 810-820nm, 3 x 625-635nm
Toiteallikas	90-265V AC sisendooteallikas 15V, 2,5A väljundiga
Max väljund Optilise võimsuse tihedus	100mW/cm ² IR, 50mW/cm ² punane
Sagedusmodulatsioon	Impulss 0-100% töösükli vahel
Rakendusprogrammid	3 eelseadistatud programmi
Rakendusaeg	10 minutit tsükli kohta
Nupuliides	3 nuppu – sees/väljas, programmi valik, esitus/paus Laaditav liitumioonaku eraldi akupesas
Aku	
Kaal	0,775kg (1,6kg koos pakendiga)
Korpus	ABS-PC plastikust ja silikoonist ühendusrihm
Jahutus	Aktiivne jahutus ventilaatoriga
Ohutus	Ületempeatuuri/ülevoolu automaatse väljalülitamise funktsioon
Tarvikud	Laadimisseade, miniriba, kehariba, duoribad, kaitseprillid FlexBeam® on II klassi FDA-välistusega meditsiiniseade
Meditsiiniseadme klass	
Vastavus	IEC: 60601-1 (Ed 3.1); IEC: 60601-1-2:2020 , IEC: 60601-1-11:2015, IEC:62366-1:2015, ISO:10993:2018, IEC 60601-2-57:2011, IEC 62304:2006

Keskkonnakaitse

See seade on RoHS3-ühilduv ja toote sees ei ole mürgiseid kemikaale. See seade sisaldab liitiumi, tulekahju korral kasutage ABC- või BC-tüüpi tulekustutit. Kui FlexBeam® on jõudnud kasutusea lõppu, ärge utiliseerige seda tavajäätmena, viige see e-jäätmete taaskasutusse.

Tehniline kirjeldus

Tehniline kirjeldus on võimalik saada Recharge Health'i või volitatud edasimüüja poole pöördudes. Lubatud keskkonningimused, sealhulgas hoiundamine ja transport:

Temperatuur: 0-32oC | Niiskus: 10-90%

HOIATUS: Seda seadet ei ole lubatud muuta, välja arvatud kvalifitseeritud teeninduspersonal poolt. Juhised laetavate akude vahetamise kohta (ainult kvalifitseeritud teeninduspersonalile) on võimalik saada hendust võttes.

Recharge Health teeb soovi korral kättesaadavaks elektriskeemid, osade loendid, kirjeldused, kalibreerimisjuhised

või muu teabe, mida volitatud teeninduspersonal osade parandamiseks vajab. Toitevõrgust eraldamine toimub eemaldatava painduva toitejuhtme abil.

Tootja kontaktandmed

Recharge Co. Ltd
58/4 Moo 7, T. Padaet, A.
Mueang, Chiangmai 50100, Tai

Telefon: +66 649 989 836
Veeb: www.recharge.health
E-post: support@recharge.health

Võtke ühendust Baltikumi ametliku Recharge Health esindajaga Luxsanat OÜ.

Telefon: +372 503 6070
Veeb: www.flexbeam.eu
E-post: info@flexbeam.eu

Kui vajate FlexBeam®-i seadistamisel või hooldamisel abi.

**Recharge® ja FlexBeam® on ettevõtte Recharge Health AS t
ütarettevõtte Recharge Company Limited registreeritud
kaubamärgid.© 2022 Recharge Co. Ltd. Kõik õigused reserveeritud.**

*FLEX***BEAM**